

Questo foglietto è stato realizzato per informare gli utilizzatori di lenti a contatto morbide idrofile PureVision® su uso e manutenzione delle proprie lenti.

Si riferisce a:

Nome del prodotto	Materiale	Contenuto in acqua	Soluzione di confezionamento
Lenti a Contatto PureVision® (Balafilcon A) Colorazione di Visibilità	Balafilcon A	36% in peso	Salina con tampone borato
Lenti a Contatto PureVision® Toric (Balafilcon A) Colorazione di Visibilità	Balafilcon A	36% in peso	Salina con tampone borato
Lenti a Contatto PureVision® Multi-Focal (Balafilcon A) Colorazione di Visibilità	Balafilcon A	36% in peso	Salina con tampone borato
Lenti a Contatto PureVision® 2 (Balafilcon A) Colorazione di Visibilità	Balafilcon A	36% in peso	Salina con tampone borato

Descrizione e cura dell'utilizzo delle lenti

Queste lenti sono state progettate per essere portate nell'arco della giornata (daily wear) e con la frequenza di sostituzione prescritta dal contattologo. Possono anche essere utilizzate come lenti monouso da gettare ogni volta che vengono tolte dagli occhi, oppure per uso prolungato da 1 a 30 giorni tra una rimozione e l'altra, come raccomandato dal contattologo. Quando vengono rutilizzate, le lenti devono essere pulite, risciacquate e disinfettate tra la rimozione e l'applicazione sugli occhi. Le lenti in Balafilcon A possono essere utilizzate anche per uso terapeutico nel trattamento delle alterazioni dell'epitelio corneale. Seguire sempre i tempi di utilizzo e la frequenza di sostituzione delle lenti raccomandati dal vostro contattologo.


Sono state sterilizzate con vapore.



NON USARE se la confezione è danneggiata oppure aperta.

Istruzioni per l'applicazione e la rimozione

Prima di toccare le lenti, lavare e asciugare sempre bene le mani evitando di utilizzare detergenti profumati o medicati. Mettere la lente sul palmo della mano. Assicurarsi che la lente sia dritta.

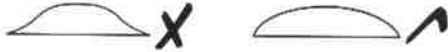

Controllare la lente prima di inserirla, e non applicarla se risulta tagliata o danneggiata. Per rimuovere la lente, assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte, con la punta del dito far scivolare la lente verso la parte bianca inferiore dell'occhio e rimuoverla. Utilizzare lacrima artificiale in caso di difficoltà a rimuovere la lente.

Cura delle lenti

- Per la sicurezza dei vostri occhi è essenziale pulire e disinfettare le lenti tra un utilizzo e l'altro
- Usare solo prodotti per la manutenzione delle lenti a contatto morbide seguendo le istruzioni del produttore

- Utilizzare sempre soluzioni di manutenzione fresche e non scadute
- Non utilizzare altre soluzioni come acqua corrente o in bottiglia o saliva per risciacquare, conservare o ridilatare le lenti
- Tenere le lenti sempre completamente immerse nella soluzione raccomandata quando non vengono utilizzate
- Non usare mai oggetti appuntiti o le unghie delle dita per prendere le lenti dal contenitore o rimuoverle dagli occhi
- Ricordarsi di pulire l'astuccio portalenti ogni volta che pulite le lenti
- Gettare sempre via le lenti una volta terminato il periodo di utilizzo prescritto dal contattologo

Avvertenze e precauzioni

Il mancato rispetto delle raccomandazioni del vostro contattologo riguardo i tempi d'uso e il regime di pulizia delle lenti può portare un maggior rischio di serie infezioni oculari. Non portate le lenti a contatto se siete affetti da:

- Allergia, infiammazione, infezione o arrossamento dell'occhio o delle zone intorno all'occhio
- Secchezza oculare (secrezione lacrimale inadeguata)
- Situazioni di malessere che interessano gli occhi come ad esempio raffreddore e influenza
- Qualsiasi malattia sistemica che colpisce gli occhi

Prima di mettere le lenti, avvisate il contattologo se:

- Praticate sport acquatici
- Frequentate ambienti eccessivamente secchi o polverosi
- Usate medicinali oculari

Se avverte uno dei seguenti problemi, rimuovete **immediatamente** le lenti:

- Dolore, bruciore, prurito, irritazione o altro fastidio oculare
- Diminuzione di comfort rispetto a prima durante il porto delle lenti
- Secrezioni oculari insolite o eccessiva lacrimazione
- Occhi arrossati
- Secchezza oculare grave o persistente
- Visione ridotta o offuscata
- Effetto tipo alone o arcobaleno intorno alle luci


Se si continua ad avvertire uno qualunque di questi sintomi anche dopo la rimozione, la pulizia e il reinserimento della lente, oppure dopo aver applicato una lente nuova, allora rimuovete la lente e **contattate subito il medico oculista**. Non dare importanza a questi sintomi può portare condizioni più gravi per l'occhio.

Precauzioni sull'uso di Soluzioni per la Manutenzione delle Lenti:

Non utilizzare Ultracare Disinfecting System Allergan o qualche suo componente (Oxysept Ultracare Disinfecting Solution, Oxysept Neutrazing Tablets, e Ultrazyme Enzymatic Cleaner) per pulire e disinfettare le lenti PureVision® Bausch + Lomb® (Batalcon A), perché le dimensioni delle lenti si modificano.

GUIDA DI RIFERIMENTO PER I SIMBOLI UTILIZZATI SU ETICHETTA E CONFEZIONI

Tasse per la Gestione dei Rifiuti Pagate come da 94/62/EC

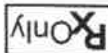

Le leggi federali (U.S.A.) consentono la vendita di questo dispositivo solo da parte di un professionista autorizzato oppure dietro una sua prescrizione.

Bausch & Lomb Incorporated
 106 London Road
 Kingstons-upon-Thames KT2 6TN, UK



Bausch & Lomb Incorporated
 Rochester NY 14609, USA



Data di revisione del presente foglietto: 29.09.2010

®/™ indicano i marchi registrati di Bausch & Lomb Incorporated
 © Bausch & Lomb Incorporated